

Masque narinaire Mirage Swift™

GUIDE DE MISE EN PLACE

Mise en place du masque narinaire Mirage Swift



orifices de ventilation

- 1 • Mettez le harnais sur votre tête. Placez le masque narinaire juste à l'entrée des narines.
Important : veillez à ce que les orifices de ventilation soient dirigés vers le haut.



- 2 • Ajustez les sangles du harnais en commençant par les sangles à l'arrière puis en poursuivant avec celles du haut. Les parties avant du harnais doivent reposer sur les pommettes. Le coussin du masque doit reposer au-dessus de la lèvre supérieure.



- 3 • Ajustez l'angle du masque narinaire en faisant pivoter le coussin vers l'avant ou vers l'arrière de manière à ce qu'il repose à l'entrée des narines sans vous gêner (et tout en créant un joint d'étanchéité).



- 4 • Raccordez l'une des extrémités du circuit respiratoire à l'appareil et l'autre extrémité à la pièce pivotante du masque.
• Mettez l'appareil en marche. Si vous entendez de l'air s'échapper, ajustez l'angle du masque narinaire et/ou les sangles du harnais jusqu'à ce que les fuites aient disparu.



bouchon

- 5 • Vous pouvez positionner le tuyau à droite ou à gauche. Pour changer le tuyau de position, otez le bouchon et remplacez-le par le tuyau. Puis remettez le bouchon sur le côté resté libre.



- 6 • Vous pouvez également mettre le tuyau au-dessus de votre tête, en le maintenant par la bague de fixation.
• Pour retirer le Mirage Swift, tirez sur le corps du masque pour le retirer et enlevez le harnais en le faisant passer par-dessus votre tête.