



Masque Nasal Mirage Activa™

MISE EN PLACE

Mise en place du masque nasal Mirage Activa™



1

- Détachez du masque un des clips du harnais, placez la bulle du masque sur le nez et mettez le harnais sur la tête.
- Fixez à nouveau le clip du harnais sur l'entourage rigide.



2

- Ajustez les sangles inférieures et supérieures du harnais jusqu'à ce que la bulle épouse doucement les contours du visage avec les tampons frontaux reposant légèrement sur le front.



3

- Si les tampons frontaux ne touchent pas le front, ajustez le support frontal soit vers l'avant, soit vers l'arrière en appuyant sur la languette.



4

- Raccordez une extrémité du circuit respiratoire à l'appareil et l'autre à la pièce pivotante du masque.
- Raccordez le coude du masque à l'entourage rigide du masque - poussez fermement jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.



5

- Mettez l'appareil sous tension et laissez la bulle se gonfler. Si de l'air s'échappe de la bulle, levez le masque légèrement et remettez-le en position.
- Vous devrez peut-être réajuster les sangles et/ou le support frontal. Ne serrez pas trop fort les sangles - veillez à ce que la chambre ActiveCell de la bulle soit gonflée légèrement et uniformément.
- Pour enlever le masque, appuyez sur les clips du harnais et tirez le masque et le harnais.

