

Régler le démarrage soft

Votre appareil de traitement est **allumé**



Appuyer
3 secondes sur
la touche de
démarrage soft.




L'affichage LCD clignote.
Régler par échelons de 5 min.
le démarrage soft souhaité en
appuyant plusieurs fois sur la
touche de démarrage soft.

Durée maximale:
30 minutes
Durée minimale:
5 minutes



Appuyer brièvement
sur la touche de
démarrage soft pour
allumer ou éteindre.

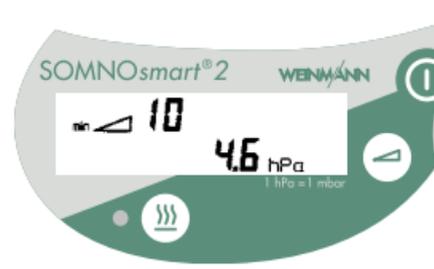

Démarrage soft Marche




Démarrage soft Arrêt

Régler le niveau d'humidification

Votre appareil de traitement est **allumé**




Appuyer
3 secondes sur
la touche
d'humidification.

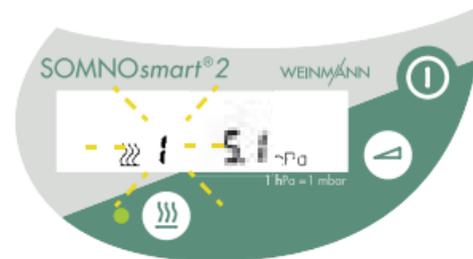

L'affichage LCD clignote.
Régler le niveau d'humidi-
fication souhaité en
appuyant plusieurs fois sur
la touche d'humidification
Recommandation 3
Maximum 6
Minimum 1



Appuyer brièvement
sur la touche
d'humidification pour
allumer ou éteindre.

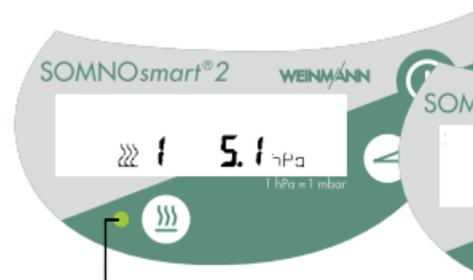

Humidification Marche



Humidification Arrêt

Petit
mode d'emploi

SOMNOsmart® 2
avec SOMNOclick®/
SOMNOclick® 300

Lire la durée d'utilisation

Votre appareil est **éteint**



Appuyer brièvement sur la touche Marche/Arrêt

La durée d'utilisation totale s'affiche pendant quelques secondes.

Votre appareil est **allumé**



Appuyer brièvement sur la touche Marche/Arrêt.

La durée de la dernière utilisation (date, durée) s'affiche pendant quelques secondes.

Sécher le système de tuyaux

Votre appareil de thérapie est **éteint**



Appuyer sur les deux touches en même temps.

Le séchage se met en marche: 30 minutes à raison de 10 – 12 mbar ! Ne pas oublier l'adaptateur de séchage !

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter le séchage

Allumer et éteindre le démarrage automatique

Votre appareil de thérapie est **éteint**



Appuyer 3 secondes la touche de démarrage soft.

Le démarrage automatique s'affiche
A 1 = démarrage automatique/Marche
A 0 = démarrage automatique/Arrêt

Changement avec la touche Marche/Arrêt.

Changement du filtre fin

1. Compteur du filtre fin ≥ 250 heures.



Le témoin »Changement de filtre« s'affiche pendant la manipulation: changer le filtre fin.

2. Compteur du filtre fin < 250 heures, le filtre fin est sale.



Pas d'affichage »Changement de filtre«, mais changer tout de même le filtre fin.



A la prochaine mise en marche, appuyer 3 secondes durant sur la touche Marche/Arrêt.



A la prochaine mise en marche, appuyer 6 secondes durant sur la touche Marche/Arrêt.



Le compteur du filtre fin est remis à zéro.



- après 3 secondes



- après 6 secondes le compteur du filtre fin est remis à zéro

Maintenance



Le symbole de maintenance s'affiche après 5000 heures. La maintenance devra être effectuée prochainement par la société Weinmann ou par un revendeur spécialisé agréé.