

3063\_3-09\_FRA-04\_04-4  
© Tous droits de reproduction réservés. Toute reproduction est soumise à l'autorisation expresse préalable de la société Weinmann.  
Sous réserve de modification de la conception de l'appareil et de son équipement. - Imprimé sur papier 100% recyclé.

**WEINMANN**


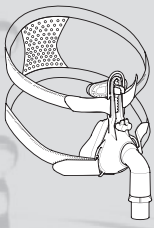










**France :** Weinmann S.A.R.L.  
Z.I. rue Lavoisier · 91430 Igny  
Tél. +33/(0)1/69 35 36 50  
E-mail info@weinmann-france.fr  
Internet www.weinmann-france.fr

**Suisse :** G. Weinmann AG  
Seestrasse 14b · 5432 Neuenhof  
Tél. +41/(0)56/416 41 11  
E-mail info@weinmann.ch  
Internet www.weinmann-suisse.ch

Comment  
nettoyer mes  
accessoires?

**WEINMANN**

MEDECINE DU SOMMEIL

Produit	Fréquence de nettoyage	Durée d'utilisation	Éléments	Nettoyage à la main	Nettoyage Lave-vaisselle	Désinfection	Stérilisation
 SOMNOmask®	Après chaque utilisation	De 6 à 12 mois	Corps du masque Raccord coudé Support Coussinet Jupe du masque Obtuteur	A l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle	Jusqu'à 65° C	Plonger dans une solution diluée	Non autorisée  A la vapeur jusqu'à 134° C
 SOMNOplus®	Après chaque utilisation	De 6 à 12 mois	Corps du masque Coude Support Coussinet Jupe du masque Obtuteur Raccord expiratoire Fente expiratoire Raccord du tuyau Douille rotative	A l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle	Jusqu'à 65° C  non autorisé	Plonger dans une solution diluée  non autorisée	Non autorisée
 SOMNOcap et SOMNOstrap	Selon les besoins	De 6 à 12 mois	Bonnet Harnais	A l'eau chaude ou dans le lave-linge à 30° C	Non autorisé	Non autorisée	Non autorisée
 Silencieux	Après chaque utilisation	De 3 à 6 mois	Pièce de raccord Douille de l'articulation Cartouche filtre	Uniquement à l'eau chaude et claire <b>sans liquide vaisselle</b>	Non autorisé	Non autorisée	Non autorisée
 Silentflow 2	Après chaque utilisation	De 6 à 12 mois	Douille intérieure/ Partie centrale Douille extérieure/ Douille de raccord	A l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle	Jusqu'à 65° C	Plonger dans une solution diluée	Non autorisée
 Circuit patient	Selon les besoins au moins une fois par mois	12 mois 6 mois	Adaptateur Tuyau à soufflets Tuyau de mesure de la pression	A l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle	Non recommandé; un nettoyage complet n'est pas possible	Plonger dans une solution diluée	Circuit patient WM 24120 : A la vapeur jusqu'à 134° C Tous les autres circuits patient : Non autorisée
 Filtre d'entrée d'air	Hebdomadaire	6 mois	—	A l'eau claire	Non autorisé	Non autorisée	Non autorisée
 Filtre fin	Pas de nettoyage possible	250 heures	—	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisée	Non autorisée
 SOMNOwave® Humidifier	Quotidienne	—	Chambre d'humification Obtuteur Garniture étanche	A l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle	Jusqu'à 65° C dans la partie supérieure	Plonger dans une solution diluée	Non autorisée
 SOMNOclick®	Quotidienne	2 années	Boîtier/partie supérieure Boîtier/partie inférieure Partie chauffante	A l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle	Jusqu'à 65° C dans la partie supérieure	Plonger dans une solution diluée	Non autorisée
 Filtre bactérien ①	Après 24 heures (3 nuits à 8 heures)	3 mois	Boîtier/partie supérieure Boîtier/partie inférieure	A l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle	Jusqu'à 65° C dans la partie supérieure	Plonger dans une solution diluée	A la vapeur jusqu'à 134° C
 Filtre à particules ②	Pas de nettoyage possible	Après 24 heures (3 nuits à 8 heures)	Filtre à particules	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisée	Non autorisée

Remarques générales :

- Cette feuille d'information ne remplace pas les modes d'emploi des différents produits mentionnés.
- Nous recommandons d'utiliser le désinfectant Gigasept FF. Veuillez consulter le mode d'emploi du fabricant.
- Après le nettoyage et la désinfection, veuillez rincer soigneusement les pièces à l'eau claire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis séchez-les.
- Pour la stérilisation à la vapeur, nous recommandons les appareils conformes à la norme EN 285, 134° C, temps de maintien minimum de 3 minutes.