


Nouveau

Amara View

Conçu pour éviter
tout risque de douleurs
sur le nez

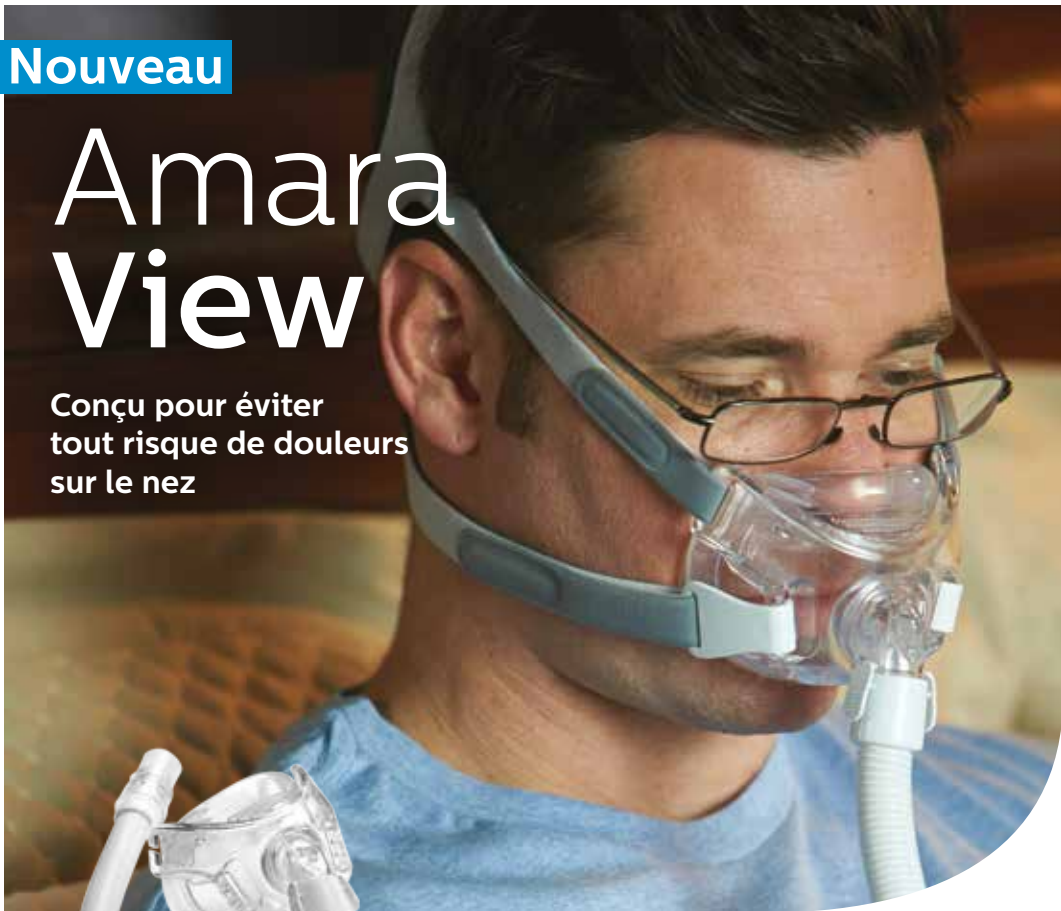

PHILIPS

Guide de mise en place du masque Amara View



Clips du harnais

Pour le déconnecter, saisir et tourner en direction opposée à la coque.

Harnais

Desserrer-le en allongeant les sangles.



Coussin

Maintenir délicatement le masque sur votre visage et **placer le coussin au-dessous de votre nez**. Maintenir le masque en place et remonter le coussin.

Note : ne pas placer le coussin sur votre nez, mais en-dessous, juste posé sur vos narines.



Harnais

Faire passer le harnais par-dessus votre tête. Tenir le masque contre votre visage.



Masque

Maintenir le masque en place et appuyer les clips pour la mise en place.



Harnais

Tirer les languettes en arrière pour ajuster à égalité les sangles inférieures et supérieures.



Circuit de ventilation

Brancher le circuit flexible (inclus avec votre appareil de PPC ou à deux niveaux de pression) au pivot du circuit du masque Amara View.

Nouveau masque naso-buccal Amara View

Design novateur

qui prévient les marques,
l'inconfort et les rougeurs
sur l'arête nasale.

Champ de vision plus dégagé

que les autres naso-
buccaux les plus utilisés*

Possibilité de mettre des lunettes,

lire ou regarder la télé



Le plus petit et léger

des masques naso-
buccaux du marché*

Facile d'utilisation

avec un design
modulaire pour 3
tailles de coussins

*test interne : données disponibles

Amara View est un masque naso-buccal à contact minimal destiné à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux. Il est réservé aux patients (> 30 kg) pour lesquels un traitement par PPC ou à deux niveaux a été prescrit. Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

Fabricant : Philips Respironics, 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, USA. Máj 20 mai 2014.

