

RESMED

S9 AutoSet™ & S9 Elite™

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES



Welcome Guide

Français

S9™ | Series
More. Comfort.

S9[™] | Series
More. Comfort.

Bienvenue

Merci d'avoir choisi la S9 AutoSet ou la S9 Elite. Avant d'utiliser ces appareils, veuillez lire entièrement le manuel de bienvenue et le guide d'information.




La S9 d'un seul coup d'œil

Le système S9 se compose des éléments suivants :

- S9 • Circuit respiratoire SlimLine • Bloc d'alimentation 90 W ou 30 W • Sac de transport S9
- Carte SD • Etui de protection de la carte SD S9.

Les accessoires en option sont les suivants :

- Humidificateur chauffant H5i • Réservoirs d'eau H5i • Circuit respiratoire standard
- Circuit chauffant ClimateLine • Bloc d'alimentation 90 W
- Bloc d'alimentation 30 W (ne permet pas de faire fonctionner l'H5i).

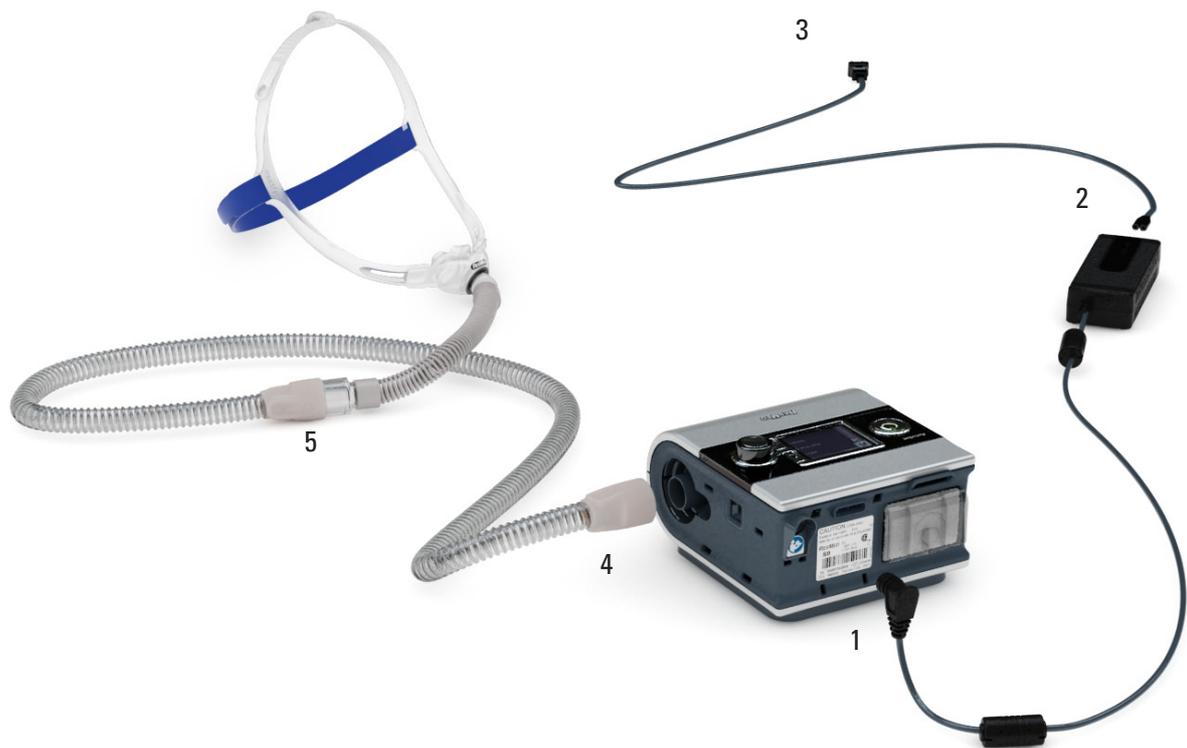

Installation

1. Branchez la fiche DC du bloc d'alimentation à l'arrière de la S9.
2. Branchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation.
3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant.
4. Raccordez fermement une extrémité du circuit respiratoire à la sortie d'air.
5. Raccordez le masque à l'extrémité libre du circuit respiratoire.

Remarques :

- Pour de plus amples informations sur le montage du masque, veuillez vous référer au manuel utilisateur de ce dernier.
- Vous trouverez la liste des masques recommandés sur le site www.resmed.com, à la page Produits, sous SAV et assistance.



Touche Marche/Arrêt
Permet de démarrer ou d'arrêter le traitement.

Menu Accueil

Ecran LCD

Menu Info
Vous permet d'afficher les statistiques sur votre sommeil.

Menu Config
Vous permet de modifier les réglages.

Bouton de réglage
Tournez le bouton de réglage pour faire défiler les options du menu et pour modifier les réglages. Appuyez sur le bouton de réglage pour ouvrir un menu et pour confirmer votre sélection.

Légende :

- Page d'accueil 
- Niveau d'humidité 
- Rampe 
- Circuit chauffant 
- Climate Control 
- Marche/Arrêt 
- Bouton de réglage 
- Menu config 
- Menu Info 

Généralités sur la S9

Le panneau de contrôle de votre S9 comprend un écran LCD, une touche Marche/Arrêt, un bouton de réglage et les touches de menu Info et Configuration.

Ajustement de la durée de rampe

La rampe a pour but de rendre le début du traitement plus confortable et correspond au temps qu'il faut pour que l'appareil passe d'une pression initiale basse à la pression de traitement. Pour ajuster la durée de rampe :



1. Avec l'écran d'accueil affiché, tournez le bouton de réglage  jusqu'à ce que la RAMPE soit affichée en bleu.
2. Appuyez sur le bouton de réglage . Votre sélection est maintenant en surbrillance orange.
3. Tournez le bouton de réglage  jusqu'à ce que la durée de rampe souhaitée s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton de réglage  pour confirmer votre sélection.

Utilisation de la fonction d'ajustement du masque

La fonction d'ajustement du masque vous aide à ajuster votre masque correctement. Elle génère la pression de traitement pendant trois minutes, avant le début du traitement, pour vous permettre de vérifier et d'ajuster votre masque dans le but de minimiser les fuites.


1. Mettez votre masque comme indiqué dans son manuel utilisateur.
2. Avec l'écran d'accueil affiché, maintenez le bouton de réglage  enfoncé pendant trois secondes. L'un des écrans AJUST. MASQUE suivants s'affiche :



3. Si nécessaire, ajustez votre masque, la bulle du masque et le harnais jusqu'à ce que vous obteniez un ajustement Bon. Au bout de trois minutes, la pression réglée est restaurée et le traitement commence. Vous pouvez quitter la fonction d'ajustement du masque à tout moment en appuyant sur le bouton de réglage .

Sélection du type de masque

Pour sélectionner le type de masque :

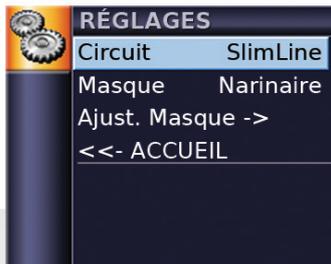

1. Appuyez sur . L'écran RÉGLAGES s'affiche.



2. Tournez le bouton de réglage  jusqu'à ce que Masque soit en surbrillance bleue.



3. Appuyez sur le bouton de réglage . Votre sélection est maintenant en surbrillance orange.



4. Tournez le bouton de réglage  jusqu'à ce que le réglage de masque souhaité s'affiche.



5. Appuyez sur le bouton de réglage  pour confirmer votre sélection.



6. Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.



Avant de commencer

1. Vérifiez que l'alimentation est branchée.
2. Ajustez la durée de rampe si nécessaire.
3. Mettez votre masque comme indiqué dans le manuel utilisateur.
4. Pour démarrer le traitement, respirez simplement dans le masque et/ou appuyez sur la touche marche/arrêt .
5. Allongez-vous et placez le circuit respiratoire de manière à ce qu'il puisse suivre vos mouvements pendant que vous dormez.
6. Pour arrêter le traitement à tout moment, retirez votre masque et/ou appuyez sur la touche marche/arrêt .

Remarque : si votre clinicien a activé la fonction SmartStart, votre appareil démarre automatiquement lorsque vous respirez dans le masque et s'arrête automatiquement lorsque vous le retirez.

Nettoyage et entretien

Veillez vous référer au manuel utilisateur de votre masque et à celui de votre humidificateur pour plus de détails sur leur entretien.

Quotidien

Retirez le circuit respiratoire en tirant sur le manchon au niveau des surfaces rugueuses. Suspendez-le dans un endroit propre et sec jusqu'à la prochaine utilisation.

Hebdomadaire

1. Détachez le circuit respiratoire de la S9 et du masque.
2. Nettoyez le circuit respiratoire à l'eau tiède avec un détergent doux.
3. Rincez soigneusement et suspendez-le pour le faire sécher.
4. Avant la prochaine utilisation, raccordez à nouveau le circuit respiratoire à la sortie d'air et au masque.

Mensuel

1. Essuyez l'extérieur de la S9 à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.
2. Vérifiez que le filtre à air n'est ni percé ni bloqué par de la saleté ou de la poussière.

Remplacement du filtre à air

Remplacez le filtre à air tous les six mois (ou plus souvent si nécessaire).

1. Retirez le couvercle du logement du filtre à air à l'arrière de la S9.
2. Retirez et jetez le filtre à air usagé.
3. Insérez un nouveau filtre à air ResMed dans le logement, en vous assurant qu'il soit bien à plat.
4. Remettez le couvercle du logement du filtre à air en place.

Couvercle du logement du filtre à air

Filtre à air




Carte SD

La carte SD fournie sert à collecter les données de traitement enregistrées par votre S9 et à charger les modifications de réglage communiquées par votre clinicien. Lorsqu'on vous le demande, débranchez la S9 de la prise murale, retirez la carte SD, glissez-la dans son étui de protection et envoyez-la à votre clinicien.

Retrait de la carte

1. Appuyez sur la carte pour la désenclencher.
2. Retirez la carte.
3. Insérez la carte dans l'étui de protection.
4. Envoyez l'étui de protection à votre clinicien en suivant les instructions.

Pour de plus amples informations sur le retrait et l'insertion de la carte, veuillez vous référer à l'étui de protection de la carte SD S9 fourni avec votre appareil. Veuillez conserver l'étui de protection de la carte SD S9 pour utilisation ultérieure.

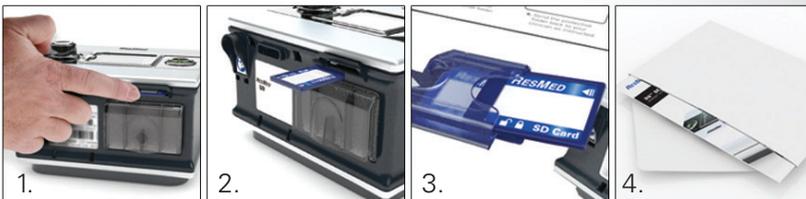

Remarques :

- Pour la stratégie de dépannage, veuillez consulter le guide d'information.
- Pour de plus amples informations sur les produits, veuillez consulter le site www.resmed.com.

S9[™] | Series
More. Comfort.

368352-Fre/2 2010-11
S9 Series
AutoSet & Elite

WELCOME
EUR 0

Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide. S9: Protected by patents: AU 691200, AU 697652, AU 702820, AU 709279, AU 724589, AU 730844, AU 736723, AU 750095, AU 750761, AU 764761, AU 779327, AU 2007252223, EP 0651971, EP 0661071, EP 0920845, EP 0927538, EP 0934723, EP 1028769, EP 1126893, EP 1144036, EP 1502618, JP 3580776, JP 3778797, NZ 504595, NZ 570415, US 5245995, US 5704345, US 6029665, US 6138675, US 6240921, US 6363933, US 6367474, US 6425395, US 6502572, US 6591834, US 6675797, US 6745768, US 6817361, US 6988498, US 7040317, US 7100608, US 7320320, US 7537010. Other patents pending. Protected by design registrations: AU 329025, AU 330142, AU 331272, AU 331676, AU 12430-2010, CN 200830346524.1, CN 200830346526.0, EU 1067417, JP 1377401, JP 1377402, JP 1377403, JP 1386693, JP 1386694, NZ 411762, NZ 413090. Others pending. S9 is a trademark of ResMed Ltd and is registered in U.S. Patent and Trademark Office. © 2010 ResMed Ltd.

CE
0120

Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.com