

## Comment prendre soin de votre masque au quotidien

---

Informations patient

### VEILLEZ SURTOUT A NE PAS UTILISER

- de chlore
- d'alcool
- d'eau de javel
- de produits hydratants
- de savons antibactériens
- d'huiles parfumées
- de produits contenant des solvants

### REMARQUES

Après le nettoyage des composants du masque, rincez-les soigneusement à l'eau claire et faites-les sécher sur un linge propre à l'abri du soleil.

Le savon pur est un savon du type savon de Marseille. Il est préférable de réserver ce savon au nettoyage du masque uniquement.

Les liquides vaisselle, shampoings, gels douche contiennent très souvent des produits hydratants, antibactériens et parfumés. Ils sont donc à éviter.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site Internet : [www.resmed.com](http://www.resmed.com) ou adressez-nous un email à [masques@resmed.fr](mailto:masques@resmed.fr)

Ce feuillet d'information ne remplace pas les modes d'emploi détaillés et notices de désinfection des produits cités.

Ultra Mirage, Vista, Activa, Swift et Mirage sont des marques commerciales de ResMed Ltd. ResMed SA, Parc de la Bandonnière, 2 rue Maurice Audibert, 69 800 Saint Priest, France. Tél +33 (0) 437 251 251 - Fax +33 (0) 4 37 251 260 © 2005 ResMed. 1010519/1 05 07



Vous êtes sous traitement par pression positive. Vous devez donc utiliser un masque tous les jours. Afin d'améliorer votre confort et l'efficacité de votre traitement, vous devez prendre soin de votre masque au quotidien.

## QUELQUES RECOMMANDATIONS

- Nettoyez le masque soigneusement après l'avoir déballé et avant sa première utilisation.
- Avant chaque utilisation du masque, nettoyez-vous bien la peau du visage pour enlever tout excès de sueur.
- Il faut éviter d'appliquer, sur le visage, des crèmes hydratantes ou des produits de beauté avant de mettre le masque.
- Un nettoyage quotidien du masque monté est recommandé. Un nettoyage hebdomadaire, plus poussé, en démontant le masque, est souhaitable.

## CONDITIONS DE NETTOYAGE


Dans de l'eau tiède avec du savon pur.

### • Nettoyage quotidien :

Utilisez 1 linge humide, imbibé de savon pur, pour nettoyer en surface votre masque ainsi que l'intérieur de la bulle.

### • Nettoyage hebdomadaire :

Le masque démonté, faites tremper les différentes pièces dans de l'eau tiède savonneuse et frottez-les.

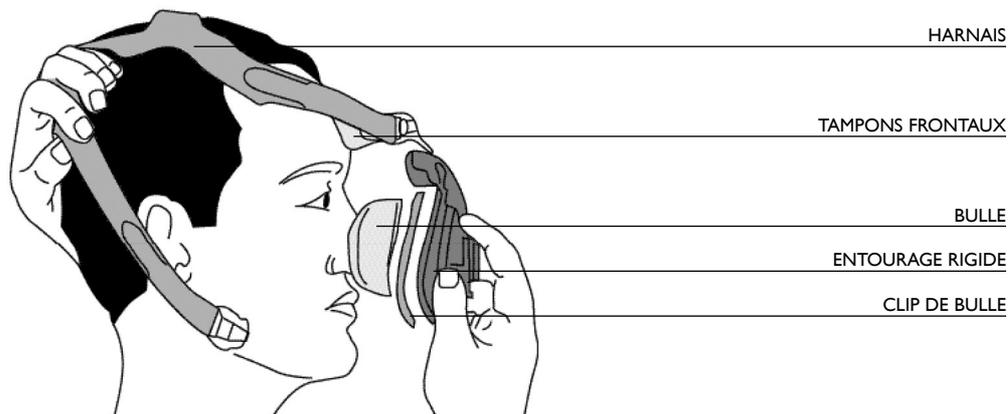

Un masque comprend toujours au moins un entourage rigide, un harnais et une bulle.

Ce schéma indique les principaux composants d'un masque. Il n'est pas représentatif d'un masque ResMed donné.

MASQUE <b>RESMED</b>	ELEMENTS DU MASQUE A DEMONTER ET A NETTOYER	ENTOURAGE RIGIDE	BULLE/ COUSSIN	CLIP DE BULLE	TAMPONS FRONTAUX	HARNAIS
Mirage™	<b>Nettoyage quotidien, monté</b>	✓	✓			
	Nettoyage hebdomadaire démonté	✓	✓		✓	✓
Ultra Mirage II™	<b>Nettoyage quotidien, monté</b>	✓	✓			
	Nettoyage hebdomadaire démonté	✓	✓	✓	✓	✓
Mirage Activa™	<b>Nettoyage quotidien, monté</b>	✓	✓			
	Nettoyage hebdomadaire démonté	✓	✓		✓	✓
Mirage Vista™	<b>Nettoyage quotidien, monté</b>	✓	✓			
	Nettoyage hebdomadaire démonté	✓	✓			✓
Mirage Swift™	<b>Nettoyage quotidien, monté</b>	✓	✓			
	Nettoyage hebdomadaire démonté	✓	✓			✓
Facial Ultra Mirage™	<b>Nettoyage quotidien, monté</b>	✓	✓			
	Nettoyage hebdomadaire démonté	✓	✓	✓	✓	✓
<b>DUREE MOYENNE D'UTILISATION</b>		6 à 12 mois	6 mois	6 mois	6 mois	6 à 12 mois