




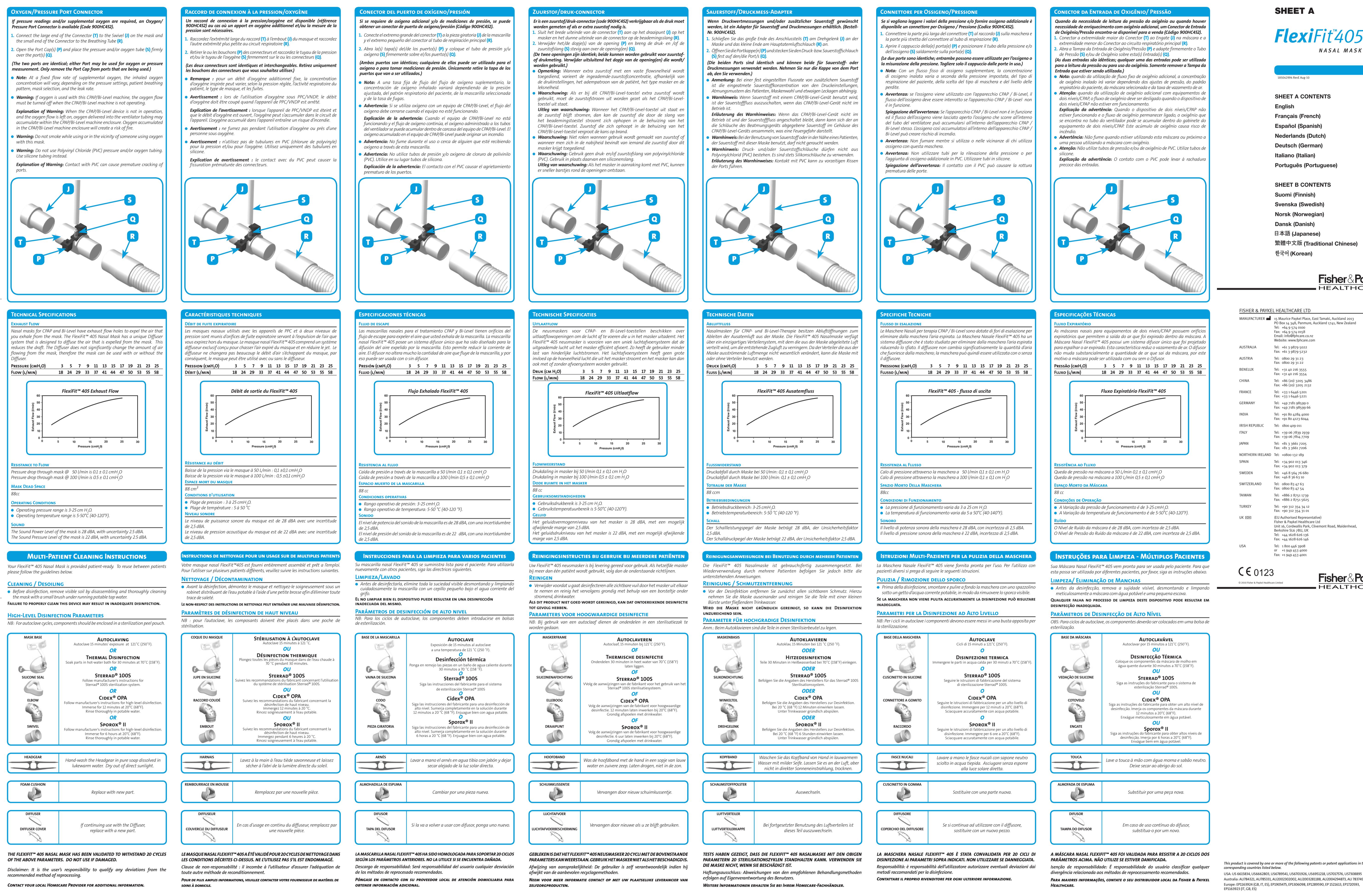

SHEET A CONTENTS
 English
 Français (French)
 Español (Spanish)
 Nederlands (Dutch)
 Deutsch (German)
 Italiano (Italian)
 Português (Portuguese)

SHEET B CONTENTS
 Suomi (Finnish)
 Svenska (Swedish)
 Norsk (Norwegian)
 Dansk (Danish)
 日本語 (Japanese)
 繁體中文版 (Traditional Chinese)
 한국어 (Korean)

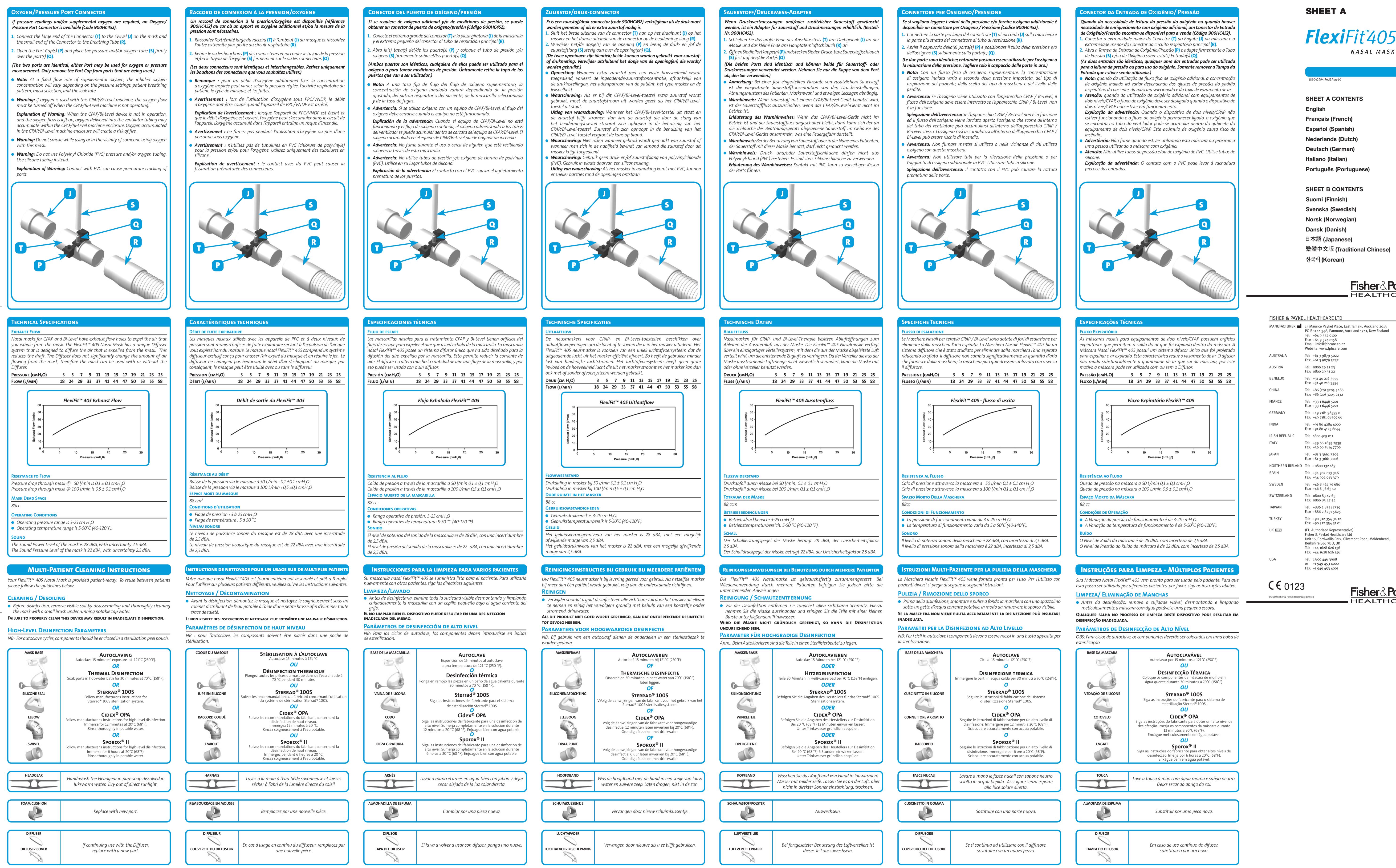

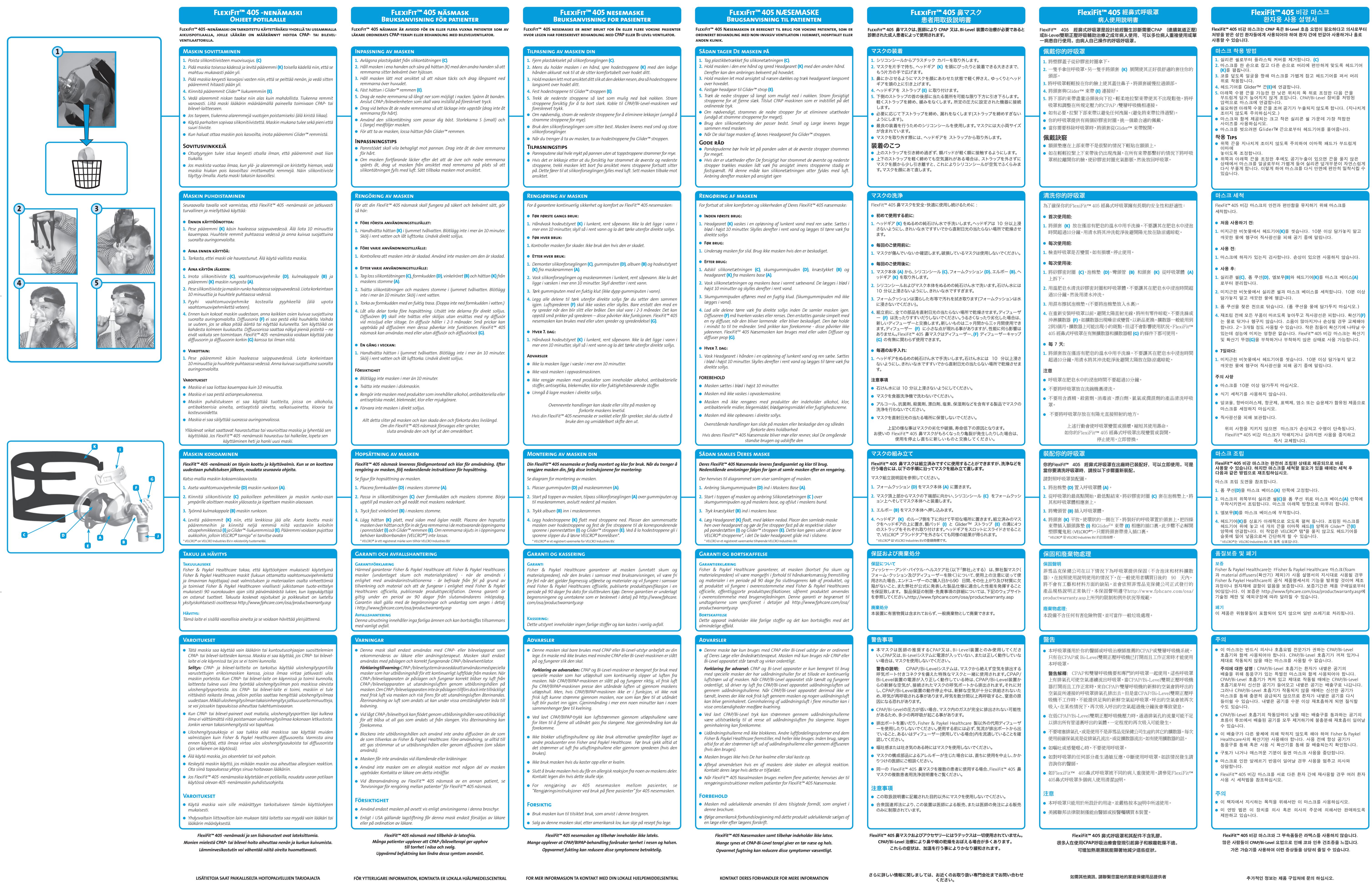

SHEET A CONTENTS

English

Français (French)

Español (Spanish)

Nederlands (Dutch)

Deutsch (German)

Italiano (Italian)

Português (Portuguese)

SHEET B CONTENTS

Suomi (Finnish)

Svenska (Swedish)

Norsk (Norwegian)

Dansk (Danish)

日本語 (Japanese)

繁體中文版 (Traditional Chinese)

한국어 (Korean)

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD

MANUFACTURER 15 Maurice Place, East Tamaki, Auckland 2013, New Zealand

PO Box 14 248, Paratui, East Tamaki, Auckland 2013, New Zealand

Fax: +64 9 574 0150 Email: info@fisherpaykel.co.nz Website: www.fisherpaykel.com

AUSTRALIA Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232

AUSTRIA Tel: 0800 29 31 23

BENELUX Tel: +31 80 216 3555 Fax: +31 80 216 3554

CHINA Tel: +86 20 2205 3066 Fax: +86 20 2205 2122

FRANCE Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5201

GERMANY Tel: +49 7181 985990 Fax: +49 7181 985996

INDIA Tel: +91 80 4284 4000 Fax: +91 80 4123 0404

IRISH REPUBLIC Tel: 1800 409 011

ITALY Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7839 2799

JAPAN Tel: +81 3 5661 2205 Fax: +81 3 5661 2205

NORTHERN IRELAND Tel: +44 28 312 188

SPAIN Tel: +34 900 033 146 Fax: +34 902 033 179

SWEDEN Tel: +46 8 564 76580 Fax: +46 8 6 63 10

SWITZERLAND Tel: 0800 83 16 63

TAIWAN Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +866 2 8751 6265

TURKEY Tel: +90 312 354 1612 Fax: +90 312 354 1610

(EU Authorised Representative) Fisher & Paykel Healthcare Ltd

UNITED KINGDOM Tel: +44 1928 626 126 Fax: +44 1928 626 146














USA Tel: 1 800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4000

CE 0123

© 2010 Fisher & Paykel Healthcare Limited

フィッシャー＆ペイケル・ジャパン株式会社
〒103-0023 東京都千代田区永田町2-8-10 リバマ場町5F

TEL: 03-5661-7205 FAX: 03-5661-7207 (代表)

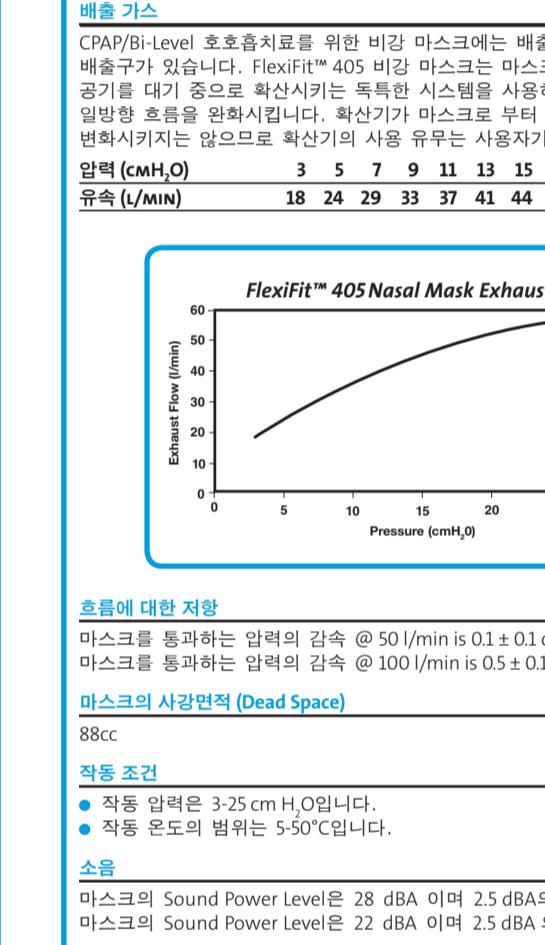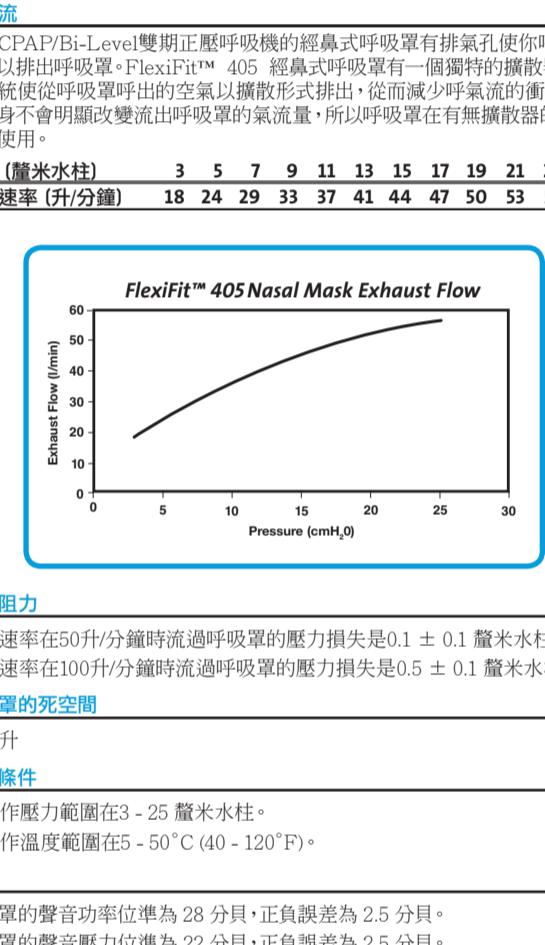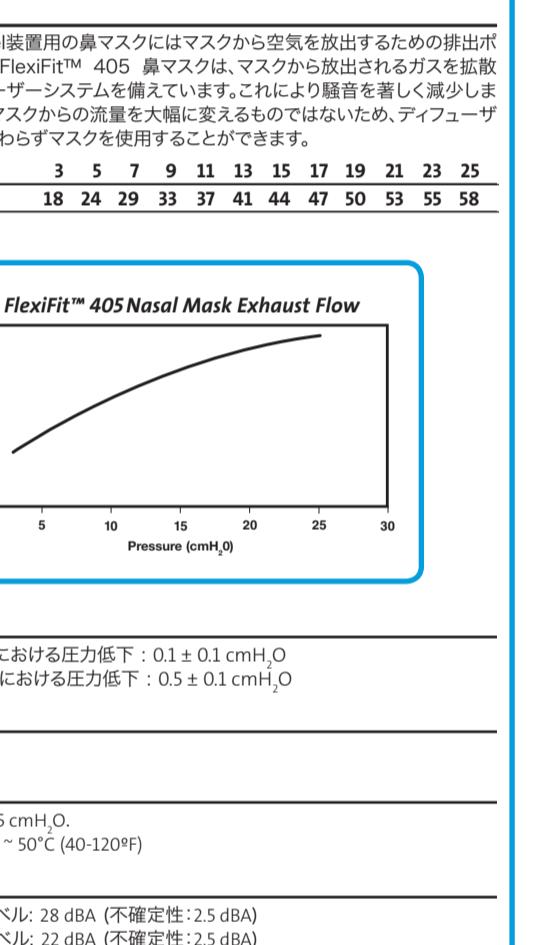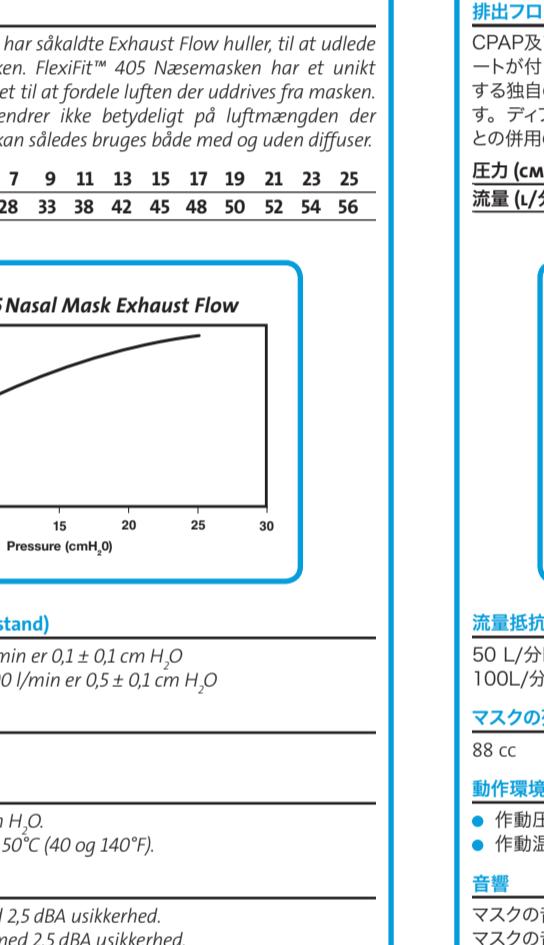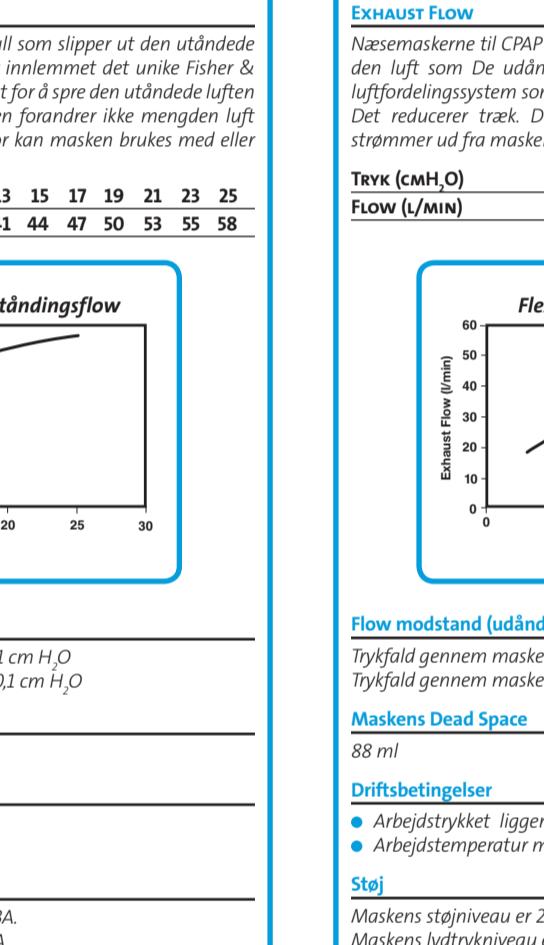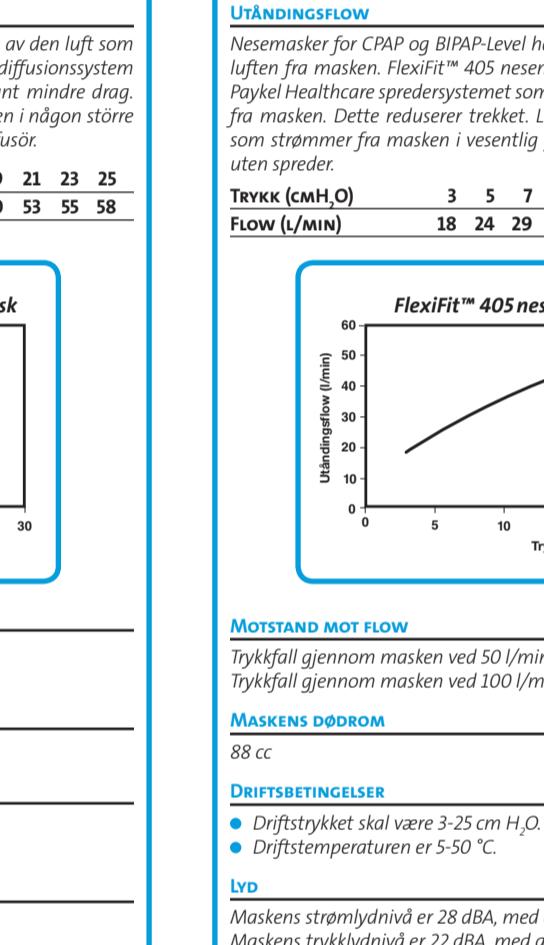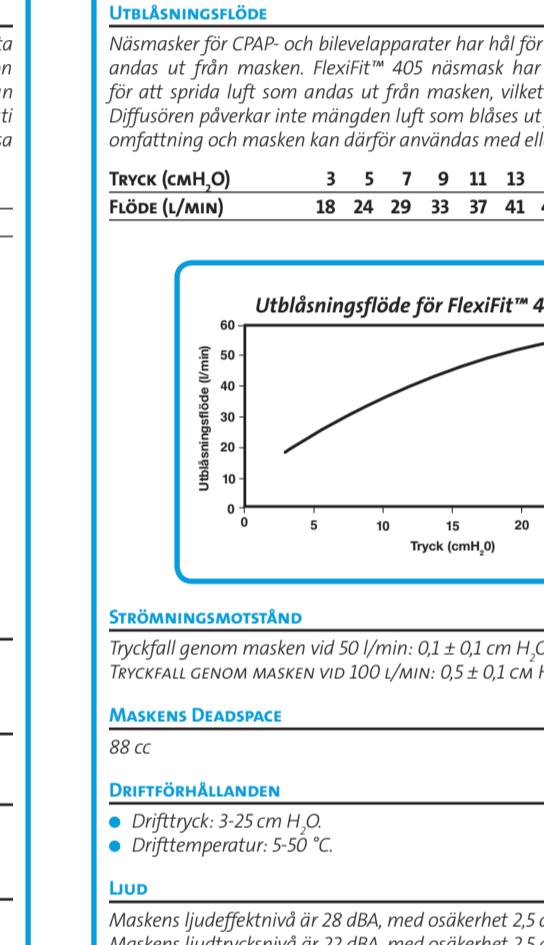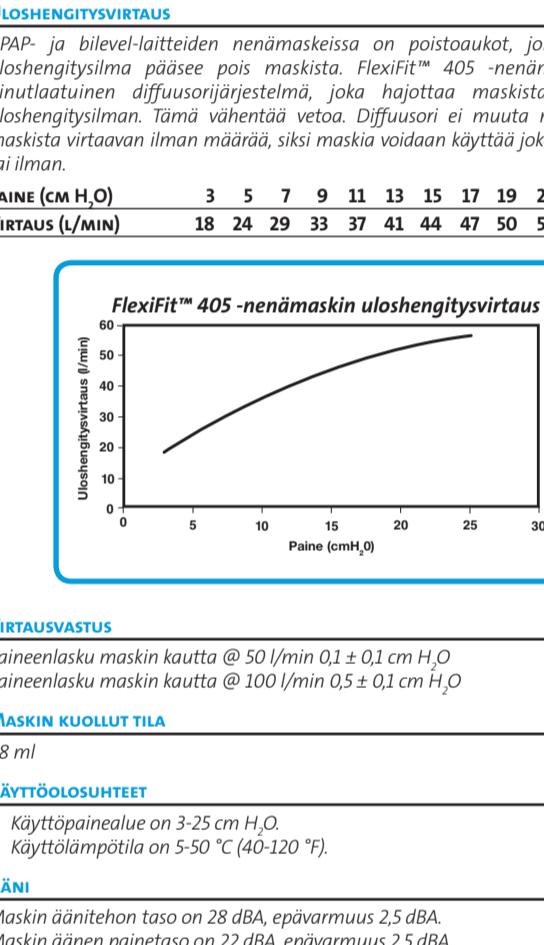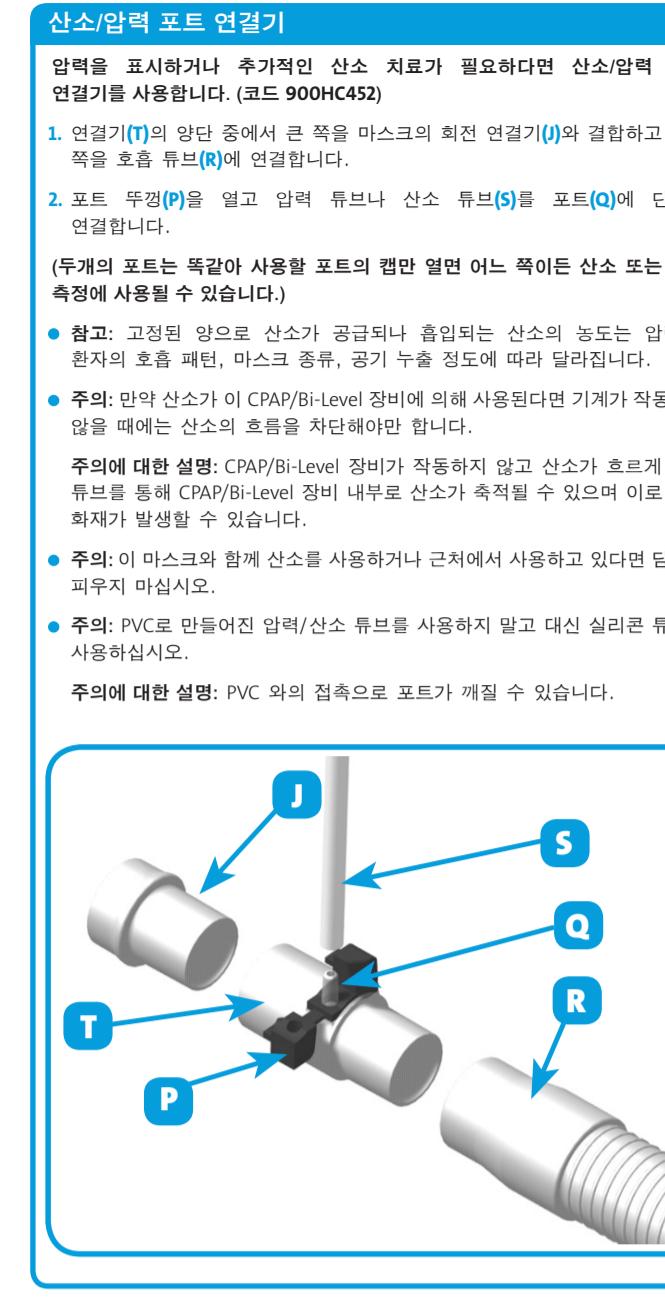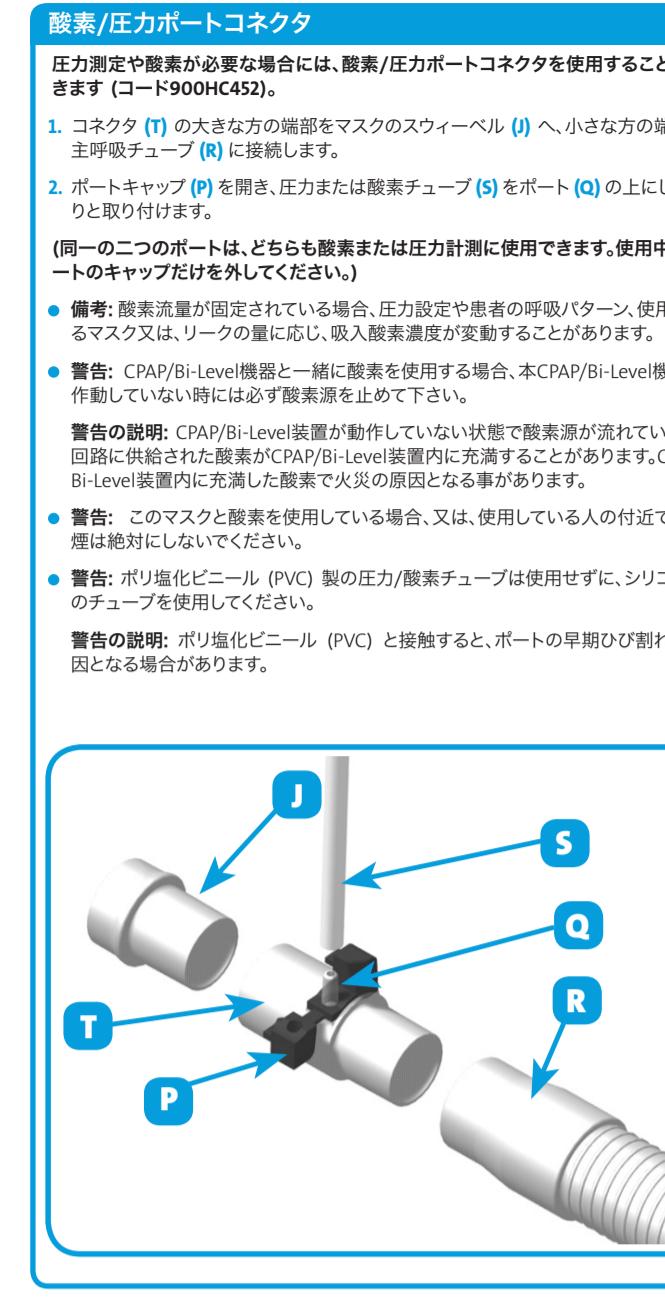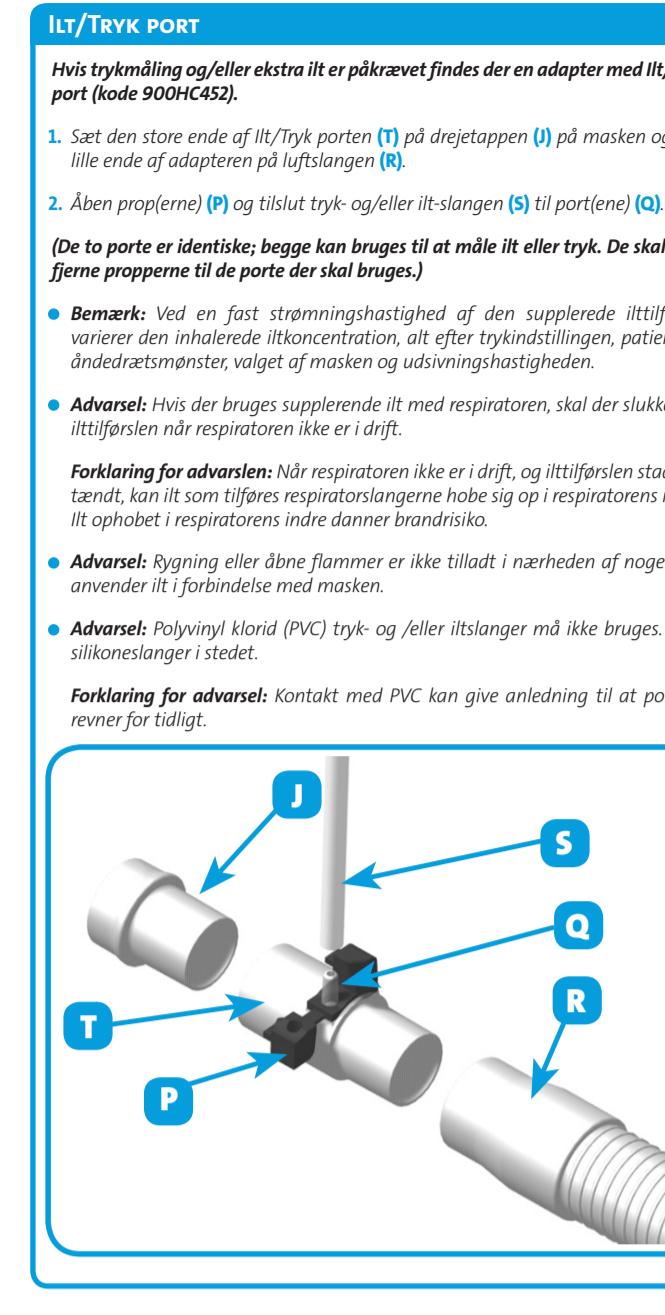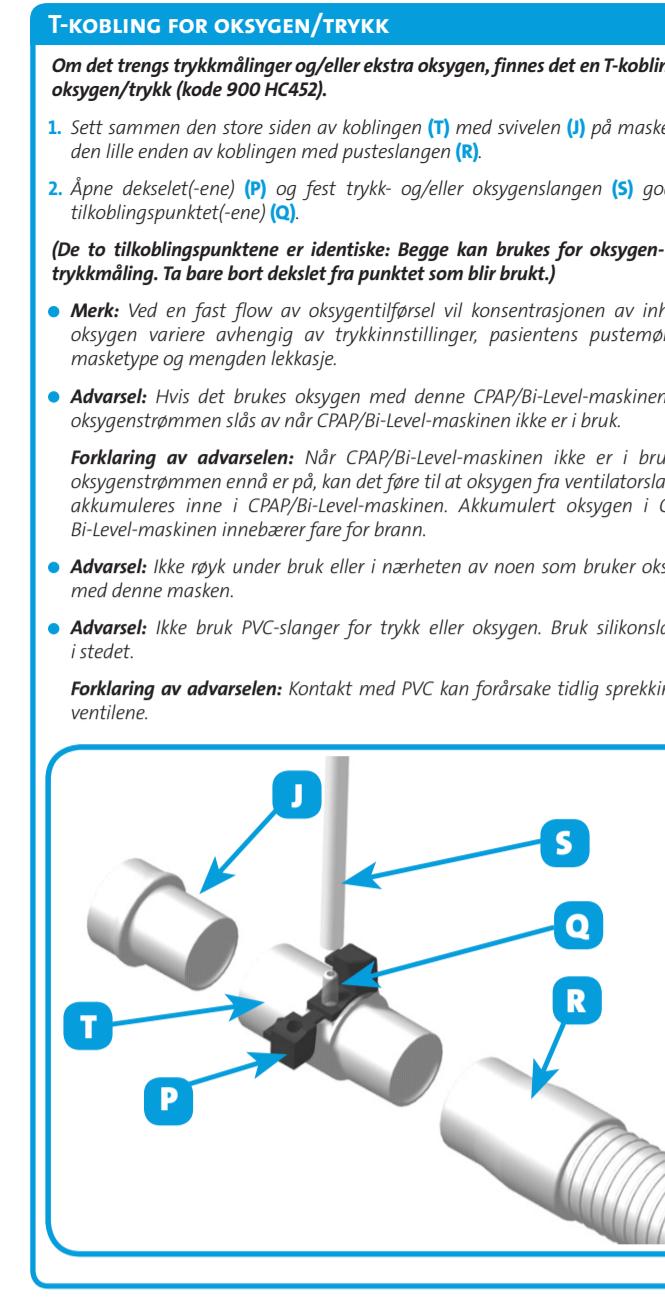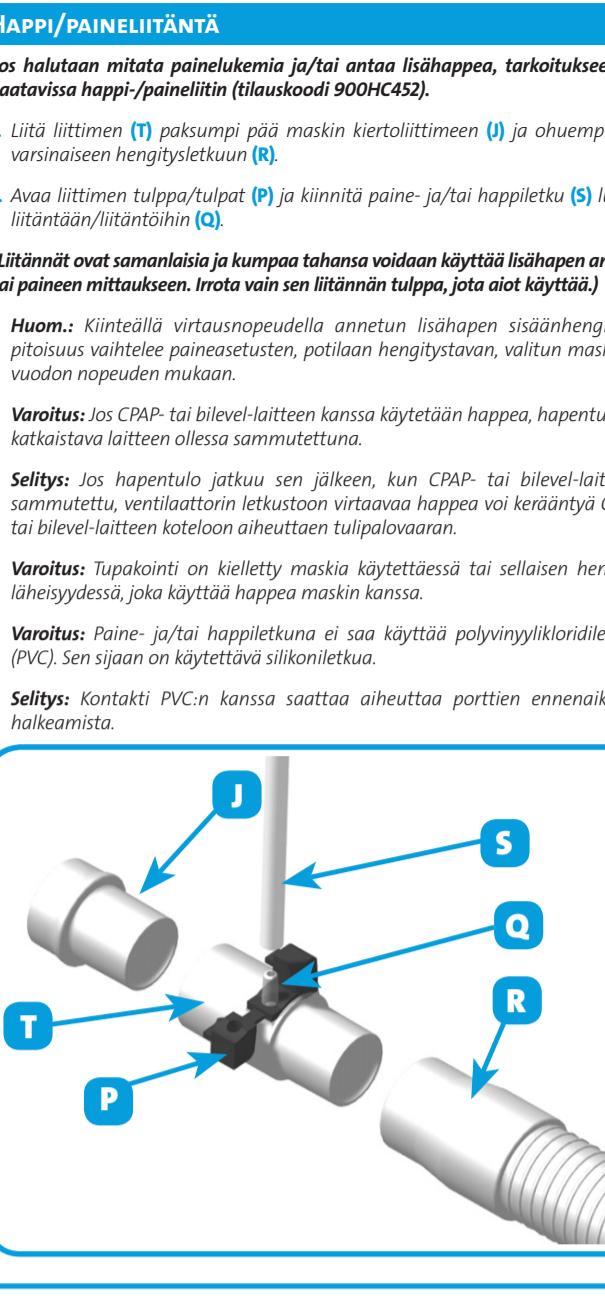

PUHDISTUSOHJEET, KUN MASKIA KÄYTETÄÄN USEILLA POTILAILLA
FlexiFit™ 405-nämmästä toimitetaan käytövalmiina. Jos maskia käytetään eri potilailla, noudattaa allaolevia ohjeita.

PUDISTAMINEN
● Poista nämmästä jokainen desinfiointi-purkamalla maski ja harjaamalla osat pienellä harsulla ja vauvan juomavannolla.

JOS MASKIA ELLÄPUHDISTAA, SE VOI HEIKENTÄÄ DESINFIOINNIN VAIKUTUSTA.
PERUSTEELLISEN DESINFIOINNIN OHJEARVOT

ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING MELLAN PATIENTER
FlexiFit™ 405 näsmask levereras färdig för patientavändning. Om masken skall återanvändas av en annan patient, se anvisningar nedan.














RENGÖRING / AVLAGSNANDE AV SMUTS
För rengöring: Avlägsna synlig smuts genom att lossa delen med den lila bortse under minnen vatten av dricksvattnets kvalitet. Öförläggning rengör kan ledta till masken inte desinficeras på fullgott sätt.

PARAMETRAR FÖR HÖGNIVÅ - DESINFICERING
OBS: Vid autoklavering skall delarna läggas i en steriliseringsspose.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER VED BIRUK PÅ FLERE PATIENTER
Den FlexiFit™ 405 näsmask levereres klar til bruk av patienten. Ved bruk av flere patienter, venligst følg instruksjoner nedenunder.

多個病人使用洗淨說明
你的FlexiFit™ 系列 405 病人呼吸罩便可用。如被不同的病人重複使用，請遵循以下指導原則。

여러 환자에게 사용하는 경주의 세척법
FlexiFit™ 405 비강 마스크는 즉시 사용할 수 있도록 조립되어 공급됩니다. 여러 환자 간에서 사용하는 경우 다음의 지침을 따르십시오.

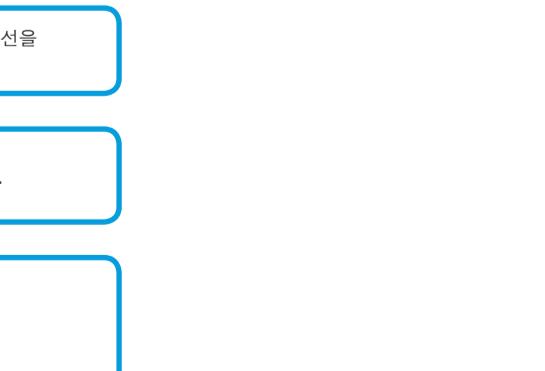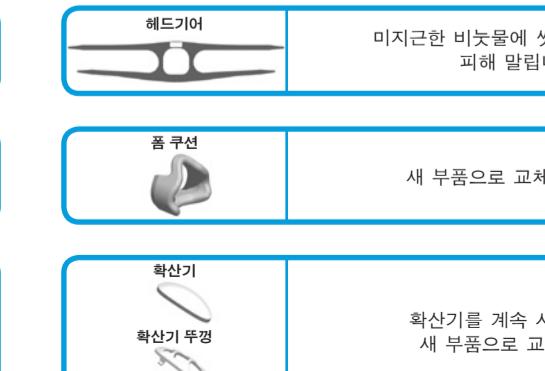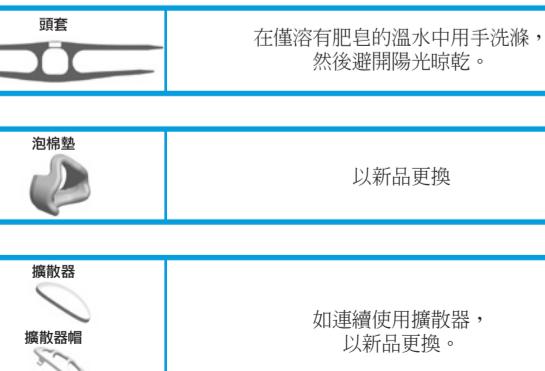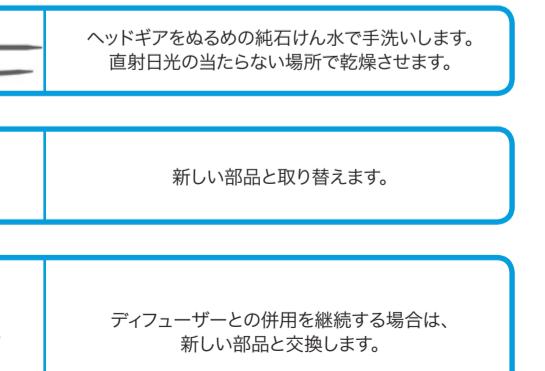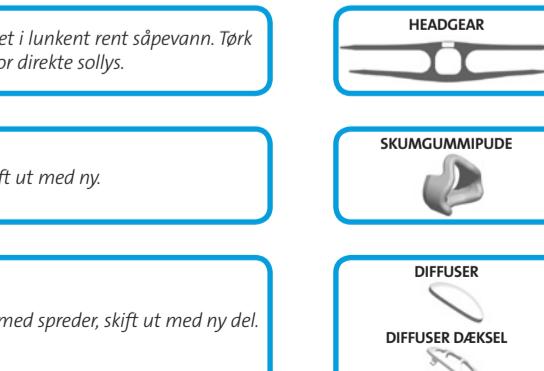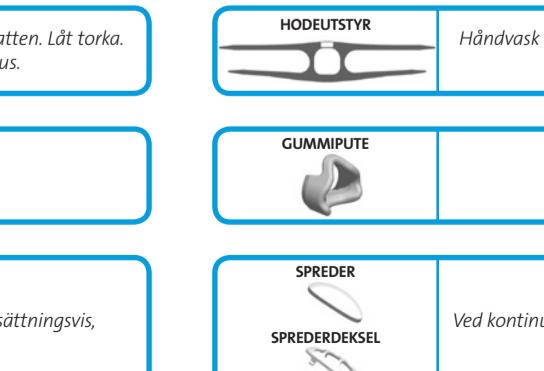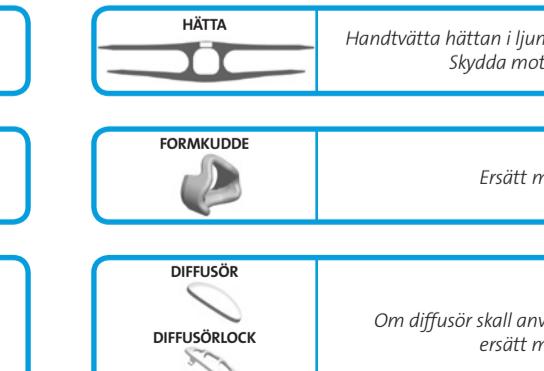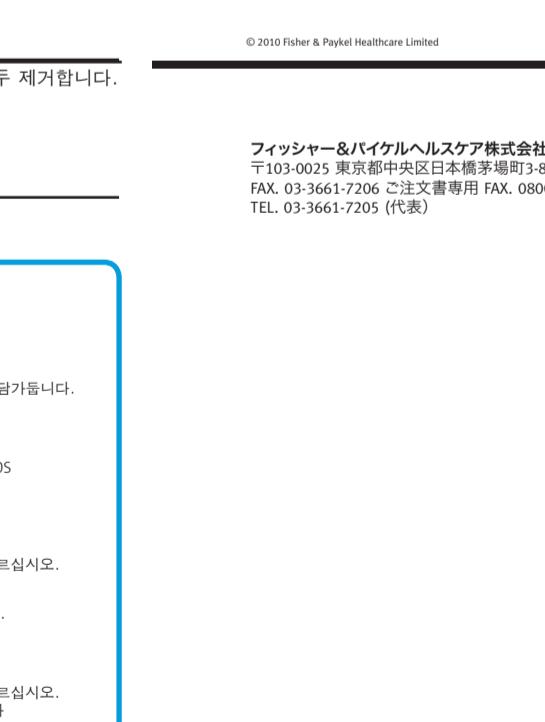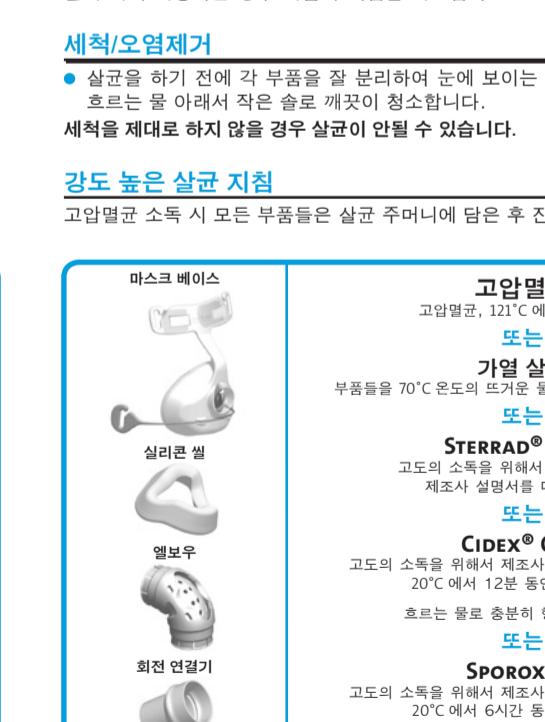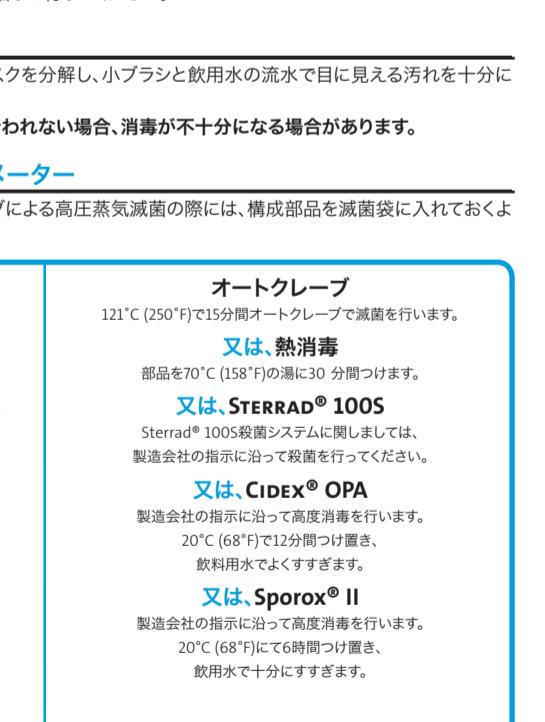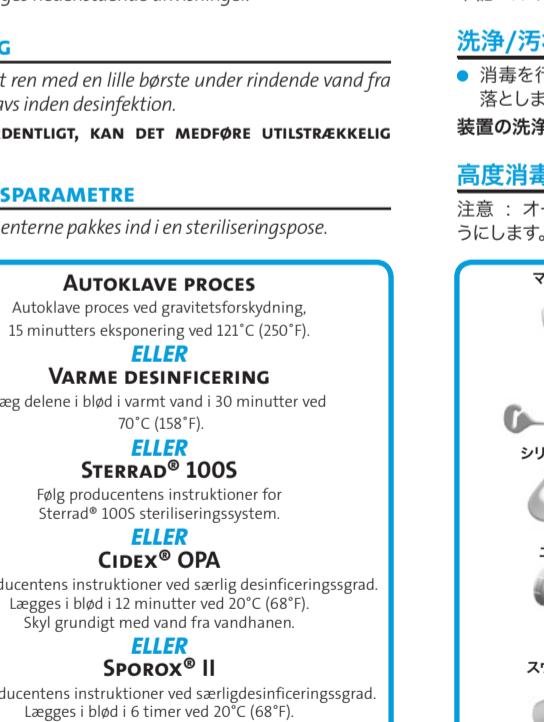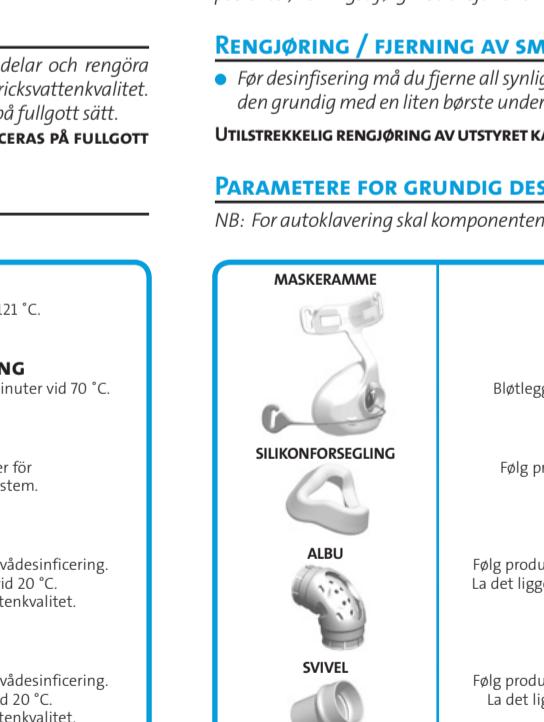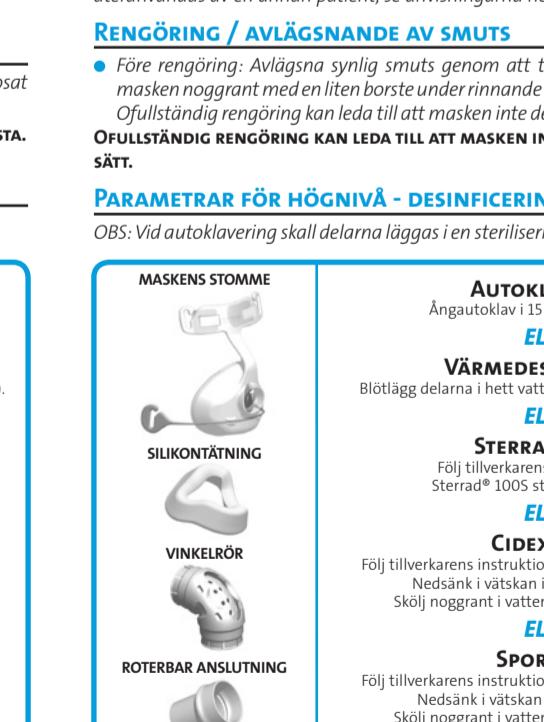

FLEXIFIT™ 405-NÄMMÄSKIN VAIHVISTUSTAANNESTUS
Jos halutaisi mitata painelukemua ja/tai antaa lisähappea, tarkoitukseen on saatavaa happea/paineliintu (tilauskoodi 900H452).

ANSVÄRNINGAR
1. Lätt liittimen (T) paikataan päätiinä maskin kiertoliittimeen (J) ja ohuempi päätiinä varsinaiseen hengityskulkuun (R).
2. Avaa liittimen tulppa/tulpat (P) ja kiinnitä paine- ja/tai hapettelu (S) luistilatähtiön/tiiminäntien (Q).

LÄHTEÄÄNNESTYS
Jos lähtee lättihappiä tai lättihappiin sisältyviä muita aineita, tarkoitukseen on saatavaa happea/paineliintu (tilauskoodi 900H452).

ANSVÄRNINGAR
1. Lätt liittimen (T) paikataan päätiinä maskin kiertoliittimeen (J) ja ohuempi päätiinä varsinaiseen hengityskulkuun (R).
2. Avaa liittimen tulppa/tulpat (P) ja kiinnitä paine- ja/tai hapettelu (S) luistilatähtiön/tiiminäntien (Q).

LÄHTEÄÄNNESTYS
Jos lähtee lättihappiä tai lättihappiin sisältyviä muita aineita, tarkoitukseen on saatavaa happea/paineliintu (tilauskoodi 900H452).

ANSVÄRNINGAR
1. Lätt liittimen (T) paikataan päätiinä maskin kiertoliittimeen (J) ja ohuempi päätiinä varsinaiseen hengityskulkuun (R).
2. Avaa liittimen tulppa/tulpat (P) ja kiinnitä paine- ja/tai hapettelu (S) luistilatähtiön/tiiminäntien (Q).

ANSVÄRNINGAR
1. Lätt liittimen (T) paikataan päätiinä maskin kiertoliittimeen (J) ja ohuempi päätiinä varsinaiseen hengityskulkuun (R).
2. Avaa liittimen tulppa/tulpat (P) ja kiinnitä paine- ja/tai hapettelu (S) luistilatähtiön/tiiminäntien (Q).

ANSVÄRNINGAR
1. Lätt liittimen (T) paikataan päätiinä maskin kiertoliittimeen (J) ja ohuempi päätiinä varsinaiseen hengityskulkuun (R).
2. Avaa liittimen tulppa/tulpat (P) ja kiinnitä paine- ja/tai hapettelu (S) luistilatähtiön/tiiminäntien (Q).

ANSVÄRNINGAR
1. Lätt liittimen (T) paikataan päätiinä maskin kiertoliittimeen (J) ja ohuempi päätiinä varsinaiseen hengityskulkuun (R).
2. Avaa liittimen tulppa/tulpat (P) ja kiinnitä paine- ja/tai hapettelu (S) luistilatähtiön/tiiminäntien (Q).

KONTAKT
Kontaktetra er lokalt hjælpmeddelingsentralen.